



Cleaner4You-v.Geyr

Siestedde 62, D-45661 Recklinghausen

Telefon: 0 23 61 / 58 24 94 0 Telefax: 0 23 61 / 90 42 13 5

E-Mail: info@cleaner4you.com, Internet: www.cleaner4you.com



Kompresse mit Gel-Füllung

wiederverwendbar, anschmiegsam

Anwendung:

Kältekompresse:

schmerzlindernd, entzündungshemmend bei

Prellungen, Zerrungen, Entzündungen, Schwellungen,

Schürfwunden, Verbrennungen, Insektenstichen etc.

nicht anwenden bei Arteriellen Durchblutungsstörungen

oder Raynaud-Syndrom

Wärmekompresse:

schmerzlindernd, durchblutungsfördernd, entspannend

bei Muskelkater, Rückenschmerzen, Menstruationsbeschwerden, etc.

Die Kalt-Warm-Kompresse ist eine Kompresse mit ungiftiger Gel-Füllung. Sie kann als Kältekompresse oder als Wärmekompresse angewendet werden und schmiegt sich bei jeder Temperatur flexibel an die schmerzende Körperstelle an.

Für die Anwendung als Kältekompresse wird die Kalt-Warm-Kompresse einfach in den Kühlschrank oder das Gefrierfach gelegt. Für die Anwendung als Wärmekompresse wird sie in die Mikrowelle gelegt.

Vor der Anwendung wird die Kalt-Warm-Kompresse in den beige-packten Vliesbeutel gelegt - für ein noch

angenehmeres Gefühl auf der Haut. Die Kalt-Warm-Kompresse ist wieder verwendbar und leicht zu reinigen.

Weitere Hinweise zur Kalt-Warm-Kompresse sowie detaillierte Informationen zur Anwendung als Kälte- oder Wärmekompresse entnehmen Sie bitte der Verpackung.

Material Folie: PA / PE Verbund

Material Gel: 100% reine Naturstoffe